

人とチェアがシンクロする。
電動ヘッドレスト搭載。

エクシードエフェックスシリーズに新たなタイプが加わりました。
ゲストの動きに合わせて、電動ヘッドレストとチェアがシンクロして動作。
スムーズなポジション移動を実現しました。
EXCEED efXは新たな次元へ。



※写真はオプション装着例です。

EXCEED
efX

｜エクシード エフェックス｜

EXCEED
efX
CREDO

｜エクシード エフェックス クレド｜

Synchronized
Motor
Headrest
シンクロナイズドモーターヘッドレスト


”M”



ゲストとチェアの動作がシンクロして
着席から診療へのスムーズなポジション移動を実現。
ドクターの治療体勢を即座に整えます。

1

ゲスト着席

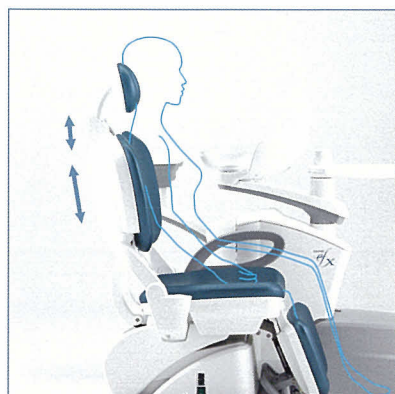

ゲストオンリーの
最適ポジションを設定




背板の高さとヘッドレスト
の高さをゲストの体格に
合わせて設定します。

バックレスト調整レバー

2

スムーズに診療ポジションへ

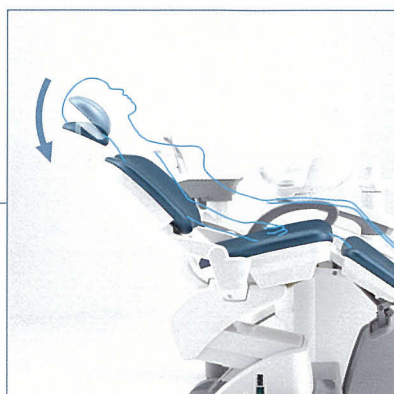


ゲストとチェアが
シンクロ動作

ゲストの動作に合わせてヘッドレストと
チェア全体がシンクロして動作。スロー
スタート、スローストップ機能搭載で
滑らかな動作を実現。ヘッドレストの
動きが気になりません。

3


即座に治療体勢へ移行

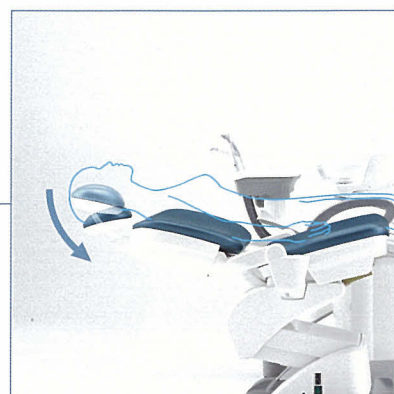

ノーズニーポジションと
頸椎保持姿勢

チェアが診療ポジションまで動作した
段階で、ゲストはすでにノーズニー
ポジションと頸椎保持の姿勢になっ
ているので、即座に治療を行えます。

ヘッドレストの背面スイッチもしくはフットコントローラスイッチで
ポジションの微調整が行えます。

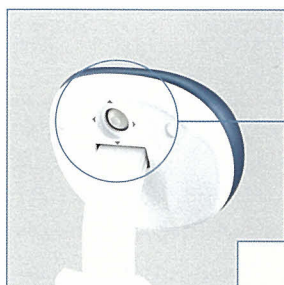

ポジション
微調整スイッチ



※写真はオプション装着例です。

発売元: 株式会社 **3M** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941(診療機器部) 製造販売元: 株式会社吉田製作所

※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。※モニター画面は、はめ込み合成です。

※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

販売名/エクシードef X-1型・5型 ©医療機器認証番号:220AKBZX00108000 TB30チェア ©医療機器届出番号:13B1X00133000026 TN29ライト ©医療機器届出番号:13B1X00133000022

2010年7月/日/50/@210/新